

INSTRUÇÃO DE USO

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE

CADASTRO ANVISA nº 82286189110

NOTA: Visando facilidade de acesso as informações estabelecidas pela ANVISA, a REACT TECHNOLOGY INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, disponibiliza todas as INSTRUÇÕES DE USO de seus produtos através do site da ANVISA. Esta instrução está disponível vide consulta ao registro 82286189110 e link:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351376472202467/?cnpj=40821171000104>

Produto Distribuído por:

**REACT TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 40.821.171/0001-04
AFE ANVISA nº.: 8.22.861-8 (025256W68239)

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOME COMERCIAL: KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA – SPINALSLICE

NOME TÉCNICO: Trocartes

CLASSE DE RISCO ANVISA: II

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

MODELOS COMERCIAIS:

- **111150006 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE A**, composto por:
 - 122260001 - Lâmina de Shaver A,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150007 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE B**, composto por:
 - 122260002 - Lâmina de Shaver B,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150008 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE C**, composto por:
 - 122260003 - Lâmina de Shaver C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150009 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE D**, composto por:
 - 122260004 - Lâmina de Shaver D,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

- **111150010 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE E**, composto por:
 - 122260013 - Lâmina de Shaver E,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150011 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE F**, composto por:
 - 122260014 - Lâmina de Shaver F,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150012 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE G**, composto por:
 - 122260015 - Lâmina de Shaver G,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150013 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE H**, composto por:
 - 122260016 - Lâmina de Shaver H,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

- **111150014 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE I**, composto por:
 - 122260031 - Lâmina Shaver I,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

-
- 122260010 - Fio Guia;
 - **111150015 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE A**, composto por:
 - 122260017 – Lâmina de Shaver A/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;
 - **111150016 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE B**, composto por:
 - 122260018 – Lâmina de Shaver B/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;
 - **111150017 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE C**, composto por:
 - 122260019 – Lâmina de Shaver C/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;
 - **111150018 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE D**, composto por:
 - 122260020 – Lâmina de Shaver D/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;
 - **111150019 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE E**, composto por:
 - 122260021 – Lâmina de Shaver E/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

-
- 122260010 - Fio Guia;

 - **111150020 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE F**, composto por:
 - 122260022 – Lâmina de Shaver F/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

 - **111150021 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE G**, composto por:
 - 122260023 – Lâmina de Shaver G/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

 - **111150022 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE H**, composto por:
 - 122260024 – Lâmina de Shaver H/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina, 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia;

 - **111150023 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE I**, composto por:
 - 122260032 - LÂMINA SHAVER I/C,
 - 122260005 - Tubo Aspirador com Coletor,
 - 122260006 - Trefina,
 - 122260007 - Trocater,
 - 122260008 - Canula Bisel,
 - 122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock,
 - 122260010 - Fio Guia

Produto fornecido esterilizado por Óxido de Etileno com validade de 3 anos.

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

COMPOSIÇÃO

Lâmina de Shaver - Aço Inoxidável ASTM F899 304 | 420 B/Silicone grau médico / Policarbonato / Poliacetal;
Tubo Aspirador com Coletor - Policarbonato / Poliacetal / Silicone;
Trefina - Aço Inoxidável ASTM F899 304 | 420 B / Poliacetal;
Trocater - Aço Inoxidável ASTM F899 304 | 420 B / Poliacetal;
Cânula Bisel - Aço Inoxidável ASTM F899 304 | 420 B / Poliacetal;
Torneira 3 Vias Luer Lock - Policarbonato / Poliacetal / Silicone;
Fio Guia - 1 unidade - Guia para entrada da cânula - Aço Inoxidável ASTM F899 304 | 420 B / Poliacetal.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

111150006 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE A, composto por:

122260001 - Lâmina de Shaver A - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel- 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150007 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE B, composto por:

122260002 - Lâmina de Shaver B - 1 unidade, 1
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150008 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE C, composto por:

122260003 - Lâmina de Shaver C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

111150009 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE D, composto por:

122260004 - Lâmina de Shaver D - 1 unidade ,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade ,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150010 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE E, composto por:

122260013 - Lâmina de Shaver E - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150011 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE F, composto por:

122260014 - Lâmina de Shaver F - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150012 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE G, composto por:

122260015 - Lâmina de Shaver G - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150013 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE H, composto por:

122260016 - Lâmina de Shaver H - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

111150014 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA LOMBAR - SPINALSLICE I, composto por:

122260031 - Lâmina Shaver I - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade ,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150015 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE A, composto por:

122260017 – Lâmina de Shaver A/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade ,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150016 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE B, composto por:

122260018 – Lâmina de Shaver B/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150017 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE C, composto por:

122260019 – Lâmina de Shaver C/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150018 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE D, composto por:

122260020 – Lâmina de Shaver D/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

111150019 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE E, composto por:

122260021 – Lâmina de Shaver E/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor- 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150020 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE F, composto por:

122260022 – Lâmina de Shaver F/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150021 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE G, composto por:

122260023 – Lâmina de Shaver G/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater- 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150022 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE H, composto por:

122260024 – Lâmina de Shaver H/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade;

111150023 - KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA CERVICAL - SPINALSLICE I, composto por:

122260032 - LÂMINA SHAVER I/C - 1 unidade,
122260005 - Tubo Aspirador com Coletor - 1 unidade,
122260006 - Trefina - 1 unidade,
122260007 - Trocater - 1 unidade,
122260008 - Canula Bisel - 1 unidade,
122250008 - Torneira 3 Vias Luer Lock - 1 unidade,
122260010 - Fio Guia - 1 unidade

KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE
- CADASTRO ANVISA Nº: 82286189110

Os produtos pertencentes a linha KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE, são embalados individualmente como KIT em blister (PET), devidamente rotulados conforme RDC 751:2022, e acomodados em embalagem final, confeccionada em papel triplex, envolvido em filme plástico de PVC (300 micras). Nenhum item pertencente aos kits será vendido separadamente.

Os produtos da linha são fornecidos estéreis (pelo método ETO - Óxido de Etileno).

INDICAÇÃO DE USO

A linha de produtos KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE é indicada para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos videoassistidos (discectomia interdiscais na coluna vertebral). Dentre os exemplos para uso cirúrgico do KIT podemos citar: procedimentos de discectomia em hérnias, protrusões, ruptura do anel fibroso das colunas cervical, lombar, torácica e sacral, mas não se limitando a estes.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A linha de produtos KIT CÂNULA PARA DISCECTOMIA DE COLUNA - SPINALSLICE tem como função a criação de uma via de acesso o mais próximo do disco intervertebral, sem a necessidade de incisões de grande extensão, e através da cânula são inseridos os instrumentos quem tem como função a manipulação dos tecidos do disco intervertebral. A sua utilização sempre levará em conta a técnica utilizada pelo cirurgião, técnica que poderá abranger desde o diagnóstico de uma patologia, passando pelo reposicionamento do disco intervertebral e chegando até o retrabalho do mesmo em função das patologias indicadas.

MODO DE USO

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. -Verifique se a embalagem não se encontra danificada; -Verifique a indicação e prazo da esterilização; -Abra a embalagem e retire os blisters. Abra o blister seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis; -Realize o procedimento o cirúrgico conforme a técnica cirúrgica; -Ao final do procedimento, descarte do produto de acordo com as normas hospitalares. O instrumento pertencente a cada KIT tem como modo de utilização, sua indicação de uso descrita abaixo:

- ▶ *Lâminas de Shavers – Função: Debridação, remoção de tecidos.*
- ▶ *Tubo Aspirador com Coletor – Função: Conduzir os fluídos provenientes da dissectomia ao receptáculo, bem como separar tecidos de fluídos.*
- ▶ *Trefina – Função – Debridação e retirada de partículas de tecidos.*
- ▶ *Trocater – Função – Guia para inserção dos demais instrumentais.*
- ▶ *Cânula Bisel – Função – Guia para inserção dos demais instrumentais.*
- ▶ *Torneira 3 Vias Luer Lock – Função – Distribuição de fluídos para irrigação.*
- ▶ *Fio Guia – Função – Guia para entrada da cânula.*

Condições para Manipulação

- ▶ O KIT deve ser manipulado cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

Condições para Armazenamento

- ▶ O KIT deve ser armazenado em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto deve ser seguida no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

Condições para Transporte

- ▶ O KIT deve ser transportado e manuseado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características.



ALERTAS

Advertências

- ▶ Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- ▶ Produto de uso único, não reutilizar.
- ▶ Os kits, são produtos recomendados para uso único, e têm seu reprocessamento proibido (Conforme RE 2605/2006) item 65 (trocar não desmontável com válvula de qualquer diâmetro).

Precauções

- ▶ Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- ▶ Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR, conforme RE 2605/2006 item 65.
- ▶ Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado.
- ▶ Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatômicas do paciente a fim de garantir que o ponto de inserção do KIT esteja longe de vasos sanguíneos e outras estruturas anatômicas de interesse.
- ▶ Não exercer força excessiva no manuseio do produto, pois a pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e tecidos próximo ao local de inserção da cânula e dos instrumentais.

Contraindicações

- ▶ Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Se você tiver alguma dúvida sobre especificações técnicas ou o uso deste produto para saúde, entre em contato com o distribuidor local ou a fabricante:



FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

REACT TECHNOLOGY INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 40.821.171/0001-04